

DR. MACH

Lampa zabiegowa Dr. Mach LED 130 Plus, wersja sufitowa z ramieniem Swing

Lampa zabiegowa Dr. Mach LED 130 Plus w wersji sufitowej: 100 000 lx, 4500 K, Ra 96, 19 LED, pole 12 cm, stałe. Ściemnianie 50–100 %, produkcja niemiecka.

**9 558,00 zł**

brutto (VAT 8%) · netto 8 850,00 zł

Kod produktu 1305303330

Producent Dr. Mach

Dostępność niedostępny

Adres w sklepie <https://vetx.elmedico.pl/p/lampa-zabiegowa-dr-mach-led-130-plus-sufitowa>

Opis

Lampa zabiegowa Dr. Mach LED 130 Plus – 100 000 lx w wersji sufitowej

Dr. Mach LED 130 Plus to lampa zabiegowa o natężeniu 100 000 lx w stałym polu Ø 12 cm. To mocne, skupione światło do chirurgii małych zwierząt, ortopedii i stomatologii – tam, gdzie liczy się kontrast w głębi rany, a nie szerokie pole. Dziewiętnaście diod w czaszy o średnicy 33 cm, pobór mocy 16 W.

Co wyróżnia lampę Dr. Mach LED 130 Plus

Soczewki fasetowe obliczone komputerowo dają ostro zarysowane pole bez rozmytych brzegów. Barwa 4500 K i Ra 96 pozwalają odróżnić tkankę żywą od niedokrwionej, a płynne ściemnianie od 50 % przydaje się przy delikatnych strukturach, które przy pełnej mocy dają refleksy. Lampa prawie nie grzeje, więc można ją trzymać nisko nad polem operacyjnym.

Światło lampy zabiegowej LED 130 Plus w liczbach

- natężenie 100 000 lx, regulacja jasności w zakresie 50–100 %,
- temperatura barwowa 4500 K, współczynnik oddawania barw Ra 96,

- pole świetlne Ø 12 cm, stałe, odległość robocza 70–140 cm,
- 19 diod LED, trwałość co najmniej 60 000 godzin,
- pobór mocy 16 W, średnica czaszy 33 cm.

Wersja sufitowa z ramieniem Swing – jak zamontować lampę LED 130 Plus

Wersja sufitowa zajmuje zero miejsca na podłodze i przy ścianie. Ramię Swing obraca się wokół punktu mocowania, a głowicę ustawia się jedną ręką za uchwyt – nad stołem zabiegowym, nad wanną, nad stanowiskiem stomatologicznym. Przy montażu trzeba sprawdzić nośność stropu i przygotować wyprowadzenie zasilania w suficie, resztę robi instalator.

Porównanie lamp zabiegowych Dr. Mach

Porównanie lamp zabiegowych Dr. Mach dostępnych w VetX

Model	Natężenie	Barwa	Ra	Pole świetlne	LED	Pobór mocy
Dr. Mach LED 115	60 000 lx	4000 K	97	Ø 11 cm, stałe	7	10 W
Dr. Mach Light LED 120	40 000 lx	4500 K	96	Ø 15 cm, stałe	12	9 W
Dr. Mach Light LED 120F	50 000 lx	4500 K	96	Ø 13–18 cm, ogniskowane	12	9 W
Dr. Mach LED 130F	70 000 lx	4500 K	96	Ø 13–19 cm, ogniskowane	19	16 W
Dr. Mach LED 130 Plus	100 000 lx	4500 K	96	Ø 12 cm, stałe	19	16 W
Dr. Mach LED 150	110 000 lx	4500 K	97	Ø 19 cm, stałe	26	35 W

Która lampa zabiegowa Dr. Mach do jakiego gabinetu?

Do rutynowych badań i drobnych zabiegów wystarczą lampy LED 115 i Light LED 120. Ogniskowane 120F i 130F przydają się tam, gdzie raz oświetla się całe pole, a raz jeden ząb czy kanał słuchowy. LED 130 Plus i LED 150 to już oświetlenie na salę zabiegową i operacyjną małych zwierząt – 100 000 i 110 000 lx w polu, w którym nie ma czego szukać po omacku.

Zdjęcie pokazuje głowicę lampy LED 130 Plus – jest wspólna dla wszystkich wersji montażu. Ramię, statyw albo mocowanie sufitowe wyglądają inaczej niż na zdjęciu. Wszystkie lampy Dr. Mach są produkowane w Niemczech, z gwarancją dostępności części zamiennych.

Dane techniczne

Kod produktu	1305303330
Numer katalogowy producenta	1305303330
Producent	Dr. Mach
Jednostka	szt.

Numer seryjny	nie dotyczy
---------------	-------------

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/lampa-zabiegowa-dr-mach-led-130-plus-sufitowa>.
Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VetX