

EICKEMEYER

Filtr bakteryjny midi do układu oddechowego, 20 szt.

Jednorazowy filtr bakteryjny między trójnik a rurkę dotchawiczą, dla pacjentów ok. 10–90 kg (objętość oddechowa 100–1000 ml). Opakowanie 20 sztuk.



Cena na zapytanie

Kod produktu	212738
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/filtr-bakteryjny-midi-20-szt

Opis

Filtr bakteryjny midi do układu oddechowego

Filtr wpina się między trójnik układu a łącznik rurki dotchawiczej — czyli w jednym miejscu, przez które przechodzi wszystko, co pacjent wydycha. Wersja midi jest przeznaczona dla pacjentów ok. 10–90 kg, przy objętości oddechowej 100–1000 ml.

Po co filtr bakteryjny przy znieczuleniu

Układ oddechowy aparatu wraca do kolejnego pacjenta. Filtr jednorazowy jest najprostszym sposobem, żeby nie przenosić drobnoustrojów między pacjentami i żeby ograniczyć osadzanie się wydzieliny w rurach i pochłaniaczu — a przy okazji skraca listę rzeczy do mycia po zabiegu.

Dobór filtra do wielkości pacjenta

Filtr dobiera się do objętości oddechowej, nie „na oko”. Producent podaje dla wersji midi zakres 100–1000 ml i masę ok. 10–90 kg. Zakres drugiej wersji (micro, nr kat. 212737) zaczyna się tam, gdzie ta się kończy.

Opakowanie zbiorcze: 20 sztuk. Filtr jest jednorazowy — wymiana po każdym pacjencie, także wtedy, gdy zabieg trwał kilka minut.

Dane filtra midi

- montaż: między trójnikiem a łącznikiem rurki dotchawiczej,
- pacjenci ok. 10–90 kg,
- objętość oddechowa 100–1000 ml,
- opakowanie 20 szt.,
- nr kat. 212738.

Dane techniczne

Kod produktu	212738
Numer katalogowy producenta	212738
Producent	Eickemeyer
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 07.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/filtr-bakteryjny-midi-20-szt>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.