

EICKEMEYER

Adapter do węża odprowadzania gazów 22/30 mm

Adapter łączący węże odprowadzania gazów o średnicach 22 i 30 mm. Średnica zewnętrzna 22 mm, wewnętrzna 30 mm.



Cena na zapytanie

Kod produktu	21309513
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/adapter-do-weza-odprowadzania-gazow

Opis

Adapter do węża odprowadzania gazów

Drobiazg, przez który cały system odprowadzania gazów potrafi stać: aparat ma jedną średnicę króćca, wąż w suficie drugą. Ten adapter godzi ze sobą węże 22 mm i 30 mm.

Wymiary adaptera

- średnica zewnętrzna 22 mm,
- średnica wewnętrzna 30 mm,
- zgodny z węzami odprowadzającymi 22 mm i 30 mm.

Gdzie się przydaje przy odprowadzaniu gazów

Przy podłączaniu układu bezzwrotnego Ayre'a do aparatów NarkoVet, przyłączeniu pochłaniacza węglowego z wężem instalacji i wszędzie tam, gdzie elementy pochodzą od różnych producentów.

Nieszczelne połączenie w torze odprowadzania gazów to najczęstsza przyczyna tego, że mimo działającego systemu w sali czuć anestetyk. Adapter kosztuje mniej niż jedna butelka izofluranu.

Jak sprawdzić szczelność połączenia

Najprościej wskaźnikiem gazów anestetycznych albo, z braku sprzętu, dłonią przy złączu przy pracującym systemie. Jeżeli wyczuwalny jest przepływ, połączenie przecieka – a wtedy anestetyk zamiast do instalacji trafia do powietrza, którym oddycha zespół przez całą operację.

Dane adaptera

- średnica zewnętrzna 22 mm,
- średnica wewnętrzna 30 mm,
- do węży odprowadzania gazów 22 i 30 mm,
- sprzedawany pojedynczo,
- nr kat. 21309513.

Dane techniczne

Kod produktu	21309513
Numer katalogowy producenta	21309513
Producent	Eickemeyer
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 07.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/adapter-do-weza-odprowadzania-gazow>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.