

EICKEMEYER

Złącze do linii próbkującej kapnografu 15/22 mm

Złącze łączące rurkę dotchawiczą z trójnikiem i linią próbkującą kapnografu. Średnica zewnętrzna 15 mm, wewnętrzna 15 / 22 mm.



Cena na zapytanie

Kod produktu	321373
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/zlacze-do-linii-probkujacej-kapnografu

Opis

Złącze do kapnografu – miejsce poboru próbki

Żeby kapnograf boczostrumieniowy miał co mierzyć, próbkę trzeba pobrać jak najbliżej pacjenta. To złącze wpina się między rurkę dotchawiczą a trójnik układu oddechowego i tworzy port dla linii próbkującej.

Wymiary złącza kapnografu

- średnica zewnętrzna 15 mm,
- średnica wewnętrzna 15 / 22 mm,
- sprzedawane pojedynczo.

Do jakich linii i urządzeń

Złącze jest przeznaczone do linii próbkujących 321377 i 321378; producent podaje też zgodność z ręcznym kapnografem LifeVet CP (321880).

Im bliżej rurki pobieramy próbkę, tym wierniejszy jest zapis krzywej kapnograficznej. U bardzo małych pacjentów warto połączyć to złącze z adapterami redukującymi przestrzeń martwą (215815).

Dlaczego złącze bywa elementem zużywalnym

Port poboru próbki jest wąski i łatwo go zatkać wydzieliną albo skroploną wodą. Złącze myje się i dezynfekuje razem z układem, ale przy pierwszym podejrzeniu niedrożności – na przykład gdy kapnograf pokazuje płaską krzywą przy oddychającym pacjencie – wymienia się je bez żalu. Sprzedawane jest pojedynczo, więc zapas nie zajmuje miejsca.

Dane techniczne

Kod produktu	321373
Numer katalogowy producenta	321373
Producent	Eickemeyer
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 07.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/zlacz-do-linii-probkujacej-kapnografu>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.