

EICKEMEYER

Zestaw 10 elektrod do jednostek EickTron

Komplet 10 elektrod monopolarnych o różnych kształtach do rękojeści jednostek EickTron 160 i 4.0.



Cena na zapytanie

Kod produktu	323136
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/zestaw-10-elektrod-do-eicktron

Opis

Zestaw elektrod monopolarnych do diatermii EickTron

Dziesięć elektrod w różnych kształtach do rękojeści 323137 i 323140. Elektroda nożowa do cięcia skóry i powięzi, igłowa do precyzyjnych nacięć i drobnych zmian, kulkowa do koagulacji powierzchni, pętlowa do usuwania zmian egzofitycznych – jeden zestaw pokrywa typowy dzień zabiegowy.

Zgodność zestawu elektrod z jednostkami EickTron

- EickTron 160 (323135) i EickTron 4.0 (323400) – według producenta,
- rękojeści 323137 (bez przełącznika) i 323140 (z przełącznikiem palcowym).

Elektrody czyści się z nagaru zaraz po zabiegu, zanim zaschnie – gąbką ścierną albo szczoteczką, nigdy skalpelem, bo rysy przyspieszają przywieranie tkanki. Sterylizacja w autoklawie.

Kiedy dokupić zestaw elektrod

Gdy końcówki są wytarte, pogięte albo zostały już tylko dwie ulubione. EickTron 4.0 ma zestaw 10 elektrod w komplecie; do EickTron 160 elektrody dobiera się osobno. Warto też trzymać drugi komplet w sterylizacji,

żeby przy dwóch zabiegach pod rząd nie czekać na autoklaw – no i elektroda igłowa łamie się częściej, niż by się chciało.

Dane techniczne

Kod produktu	323136
Numer katalogowy producenta	323136
Producent	Eickemeyer
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 06.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/zestaw-10-elektrod-do-eicktron>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VetX