


EICKEMEYER

## Rękojeść monopolarna do jednostek EickTron

Rękojeść (uchwyt elektrod) do jednostek elektrochirurgicznych EickTron 160 i 4.0. Aktywacja przełącznikiem nożnym jednostki.

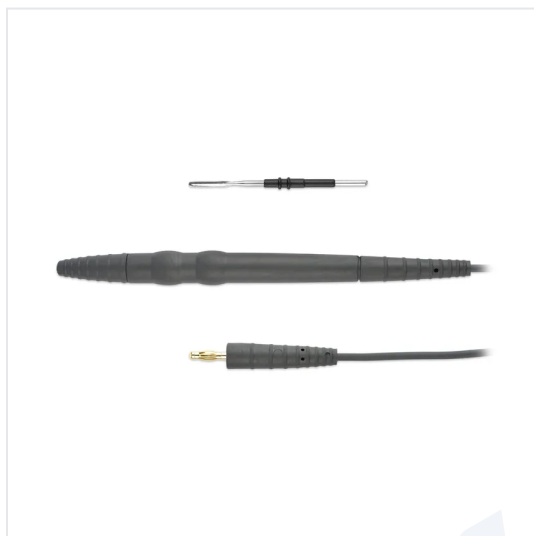

### Cena na zapytanie

|                 |                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod produktu    | 323137                                                                                                                                |
| Producent       | Eickemeyer                                                                                                                            |
| Dostępność      | niedostępny                                                                                                                           |
| Adres w sklepie | <a href="https://vetx.elmedico.pl/p/rekojesc-monopolarna-do-eicktron">https://vetx.elmedico.pl/p/rekojesc-monopolarna-do-eicktron</a> |

### Opis

#### Rękojeść monopolarna do diatermii EickTron

Podstawowy uchwyt elektrod do pracy monopolarnej. Do gniazda rękojeści wkłada się elektrodę z zestawu 323136 (nożową, igłową, kulkową lub pętlową), a kabel podłącza do gniazda monopolarnego jednostki. Cięcie i koagulację wyzwała się przełącznikiem nożnym jednostki – ta rękojeść nie ma przycisków. Jeśli wolisz sterować palcem, wybierz rękojeść z przełącznikiem 323140.

#### Zgodność rękojeści z jednostkami EickTron

- EickTron 160 (323135) i EickTron 4.0 (323400) – według producenta,
- elektrody: zestaw 323136 i pojedyncze elektrody EickTron,
- zapasowa rękojeść warto mieć w sterylizacji, żeby nie przerywać dnia zabiegowego.

Przed każdym zabiegiem sprawdź, czy elektroda siedzi pewnie w gnieździe rękojeści i czy izolacja kabla nie jest przetarta – uszkodzona izolacja to najczęstsza przyczyna poparzeń poza polem operacyjnym.

## Kiedy wymienić rękojeść monopolarną

Gdy gniazdo elektrody luzuje się i elektroda „chodzi”, albo gdy izolacja przewodu pęka przy wtyczce. Rękojeść to element eksploatacyjny – przy codziennej pracy i sterylizacji wymienia się ją co kilka lat.

## Dane techniczne

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Kod produktu                | 323137      |
| Numer katalogowy producenta | 323137      |
| Producent                   | Eickemeyer  |
| Jednostka                   | szt.        |
| Numer seryjny               | nie dotyczy |

Karta produktu wygenerowana 06.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/rekojesc-monopolarna-do-eicktron>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VetX