

EICKEMEYER

Elektroda neutralna metalowa 120 × 160 mm do jednostek EickTron

Płytką neutralną (bierną) ze stali, 120 × 160 mm, wielorazową. Wymaga kabla 323138.



Cena na zapytanie

Kod produktu	323141
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/elektroda-neutralna-metalowa-do-eicktron

Opis

Elektroda neutralna do diatermii – zamknięcie obwodu monopolarnego

W trybie monopolarnym prąd wchodzi przez elektrodę czynną i musi wrócić do jednostki przez dużą powierzchnię – to zadanie elektrody neutralnej. Metalowa płytką 120 × 160 mm układana jest pod pacjentem, najlepiej pod zwilżonym ręcznikiem albo z żelą, tak żeby przylegała całą powierzchnią do skóry pozbawionej sierści. EickTron 4.0 kontroluje podłączenie elektrody neutralnej i nie pozwala ciąć, gdy jej brakuje.

Elektroda neutralna wielorazowa – zgodność

- EickTron 160 (323135) i EickTron 4.0 (323400) – według producenta,
- wymaga kabla elektrody neutralnej 323138 (osobno),
- wymiary 120 × 160 mm, metal, do mycia i dezynfekcji.

Zbyt mała powierzchnia styku albo sucha, owłosiona skóra pod płytką to najczęstsza przyczyna oparzenia pacjenta poza polem operacyjnym. U małych pacjentów alternatywą jest elektroda doodbytnicza 323142.

Dla kogo jest metalowa elektroda neutralna

Dla każdej sali z diatermią monopolarną. Wielorazowa płytka jest tańsza w eksploatacji niż jednorazowe elektrody samoprzylepne, które u zwierząt i tak trudno przykleić.

Dane techniczne

Kod produktu	323141
Numer katalogowy producenta	323141
Producent	Eickemeyer
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 06.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/elektroda-neutralna-metalowa-do-eicktron>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

VetX