

EICKEMEYER

Stół operacyjny Eickemeyer V-Top 140 × 50 cm, elektryczny, z systemem szyn

Stół operacyjny z dwudzielnym blatem V ze stali nierdzewnej (panele regulowane 0–90°), 140 × 50 cm, napęd elektryczny, wysokość 72–112 cm, przechył do 75°. W komplecie system szyn i 4 bloki mocujące.



Cena na zapytanie

Kod produktu	602060
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/stol-operacyjny-v-top-140x50-elektryczny

Opis

Stół operacyjny V-Top 602060 – blat, który sam układa pacjenta

Blat tego stołu składa się z dwóch niezależnie ustawianych paneli ze stali nierdzewnej. Rozchylone na płasko dają zwykły stół 140 × 50 cm; złożone w V (każdy panel od 0 do 90°) tworzą rynnę, w której pacjent w pozycji grzbietowej leży stabilnie bez worków i klinów. Do zabiegów brzusznych, kastracji, cystotomii czy ortopedii kończyn miednicznych to ogromna oszczędność czasu przy układaniu.

Między panelami jest wyjmowana rynna z odpływem, więc płyny z pola operacyjnego i z mycia spływają w jedno miejsce. Rynnę myje się osobno, w zlewie.

Wyposażenie i parametry stołu V-Top

- dwa panele blatu ze stali nierdzewnej, regulacja 0–90°, wymiar całkowity 140 × 50 cm,
- napęd elektryczny, regulacja wysokości 72–112 cm,
- jednokierunkowy przechył do ok. 75°,
- podstawa w kształcie X, 4 niezależnie regulowane stopy (do wymiany na kółka),
- w komplecie system szyn i 4 bloki mocujące z szybkozłączem,

- 3 lata gwarancji producenta na kolumnę.

Do stołu V-Top pasuje półokrągła taca stomatologiczna 602065 (do zabiegów przy głowie) oraz statyw do kroplówki 605200 na szynę standardową.

Do jakich zabiegów nadaje się ten stół operacyjny

Stół operacyjny do chirurgii miękkiej i ortopedii

Blat ze stali nierdzewnej z krawędzią przeciwkapiącą i otworem odpływowym zbiera płyny z pola operacyjnego i daje się zdezynfekować w kilka minut między pacjentami. Przechył blatu przydaje się przy zabiegach w obrębie jamy brzusznej, gdy trzeba ułożyć pacjenta w pozycji Trendelenburga, a także przy pracy na kończynach.

Stół do stomatologii i zabiegów przy głowie

Z półokrągłą tacą stomatologiczną (dostępna osobno) stół zamienia się w stanowisko do sanacji jamy ustnej: głowa pacjenta leży nad tacą z sitem, płyn z płukania spływa do odpływu, a nie na podłogę.

Stół zabiegowy na co dzień

Zakres wysokości 72–112 cm pozwala pracować na siedząco przy drobnych zabiegach i na stojąco przy dłuższych operacjach, bez zmiany stołu. Ten sam blat służy do badań, USG, cewnikowania i przygotowania pacjenta do znieczulenia.

Porównanie stołów operacyjnych Eickemeyer

Model	Blat	Wysokość	Przechył	Napęd	Podstawa
X-BASE MOVE 50 × 130 (601420)	stal nierdzewna, 130 × 50 cm	72–112 cm	do 90°	hydrauliczny, pompa nożna	X, 4 podwójne kółka z hamulcem
X-BASE MOVE 60 × 130 (601430)	stal nierdzewna, 130 × 60 cm	72–112 cm	do 90°	hydrauliczny, pompa nożna	X, 4 podwójne kółka z hamulcem
Stół elektryczny 50 × 130 (601550)	stal nierdzewna, 130 × 50 cm	72–112 cm	do 90°	elektryczny	stal nierdzewna, 4 regulowane stopy
Stół elektryczny 60 × 130 (601560)	stal nierdzewna, 130 × 60 cm	72–112 cm	do 90°	elektryczny	stal nierdzewna, 4 regulowane stopy
Stół hydrauliczny 50 × 130 (601950)	stal nierdzewna, 130 × 50 cm	72–112 cm	do 90°	hydrauliczny	stal nierdzewna, 4 regulowane stopy

Model	Błat	Wysokość	Przechył	Napęd	Podstawa
Stół hydrauliczny 60 × 130 (601960)	stal nierdzewna, 130 × 60 cm	72–112 cm	do 90°	hydrauliczny	stal nierdzewna, 4 regulowane stopy
Stół hydrauliczny, błat płaski 60 × 130 (601940)	stal nierdzewna, płaski, 130 × 60 cm	72–112 cm	do 90°	hydrauliczny	stal nierdzewna, 4 regulowane stopy
V-Top elektryczny (602060)	dwa panele ze stali nierdzewnej, 140 × 50 cm	72–112 cm	do 75°	elektryczny	X, 4 regulowane stopy (opcjonalnie kółka)
V-Top hydrauliczny (602070)	dwa panele ze stali nierdzewnej, 140 × 50 cm	72–112 cm	do 75°	hydrauliczny	X, 4 regulowane stopy (opcjonalnie kółka)
HEDO (603618)	przezierny dla RTG, zdejmowany, 134 × 39 cm	72,5–92,5 cm	opcja (rozbudowa)	elektryczny, jedno- lub dwustronny	4 blokowane kółka skrętne
Scissor Table II (604200)	stal nierdzewna, 130 × 60 cm	28–105 cm	opcja	elektryczny, pedał	nożycowa, stacjonarna

Dla kogo jest stół operacyjny z blatem V

Dla lecznic, w których dominuje chirurgia miękka i ortopedia u psów – tam, gdzie codziennie układa się pacjenta na grzbiecie. Wersja elektryczna pozwala zmieniać wysokość przyciskiem, bez pompowania, co doceni zespół, który operuje wiele godzin dziennie. Jeśli na stole częściej badasz niż operujesz, prostszy i tańszy będzie zwykły stół z płaskim blatem.

Dane techniczne

Kod produktu	602060
Numer katalogowy producenta	602060
Producent	Eickemeyer
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/stol-operacyjny-v-top-140x50-elektryczny>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Vetx