

EICKEMEYER

System szyn standardowych do stołów operacyjnych X-BASE Eickemeyer

Komplet szyn do mocowania pacjenta na stole X-BASE: 2 szyny wzdłużne, 2 poprzeczne, 4 bloki z szybkozłączkami i 10 linek po 1 m.



Cena na zapytanie

Kod produktu	605050
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/system-szyn-do-stolu-operacyjnego-x-base

Opis

System szyn do stołu operacyjnego – szybkie i pewne mocowanie pacjenta

Szyny standardowe montowane wokół blatu stołu X-BASE dają punkty zaczepienia dla linek i uchwytów. Pacjenta ułożonego na grzbiecie lub na boku mocuje się w kilkanaście sekund, a bloki z szybkozłączkami przesuwa się po szynie bez narzędzi, dopasowując do wielkości zwierzęcia. Na te same szyny zakłada się statyw do kroplówki 605200 i inne akcesoria na szynę standardową.

Zawartość systemu szyn Eickemeyer

- 2 szyny standardowe wzdłużne,
- 2 szyny standardowe poprzeczne,
- 4 bloki końcowe z zaciskami szybkomocującymi,
- 10 linek mocujących o długości 1 m.

Zestaw jest zgodny ze stołami serii X-BASE (w tym mobilnymi X-BASE MOVE). Stoły V-Top 602060/602070 mają system szyn w komplecie.

Szyny na stole operacyjnym w praktyce

Najczęstszy układ: pacjent na grzbiecie, cztery linki od kończyn do bloków w narożnikach. Przy ułożeniu bocznym wystarczą dwie linki i blok po stronie grzbietu. Linki po zabiegu idą do prania, bloki i szyny myje się razem ze stołem. No i szyny to też miejsce na statyw do kroplówki, uchwyt na kable diatermii czy podpórkę pod kończynę.

Dane techniczne

Kod produktu	605050
Numer katalogowy producenta	605050
Producent	Eickemeyer
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/system-szyn-do-stolu-operacyjnego-x-base>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.