

DR. MACH

Lampa operacyjna Dr. Mach LED 150FP na statywie jezdnym

Lampa operacyjna LED niemieckiej firmy Dr. Mach: 130 000 lx w odległości 1 m, ogniskowane pole świetlne 17–24 cm, Ra 96, 4300 K, ściemniacz 50–100 %, głowica Ø 38 cm z 26 diodami, sterylizowalny uchwyt. Wersja na statywie jezdnym.



Cena na zapytanie

Kod produktu	612946
Producent	Dr. Mach
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/lampa-operacyjna-dr-mach-led-150fp-statyw

Opis

Lampa operacyjna Dr. Mach LED 150FP – światło bez cieni nad stołem

Dr. Mach to niemiecki producent oświetlenia operacyjnego z ponad stuletnią historią, a LED 150 to rozwinięcie jego popularnej lampy LED 130: większa głowica (Ø 38 cm) i więcej światła. Ta pozycja to najmocniejsza wersja FP: 130 000 lx w odległości 1 m i regulowana ogniskowa 17–24 cm – do długich zabiegów w głębokich jamach ciała. Dwadzieścia sześć diod LED daje 130 000 lx w odległości 1 m przy poborze mocy zaledwie 35 W, więc lampa prawie nie grzeje głowy chirurga ani pola operacyjnego.

Współczynnik oddawania barw Ra 96 i temperatura barwowa 4300 K to parametry, przy których tkanki wyglądają naturalnie – łatwiej odróżnić żywą tkankę od niedokrwionej i zobaczyć drobne krwawienie. Ściemniacz elektryczny reguluje jasność w zakresie 50–100 %.

Lampa na statywie jezdnym – montaż i użytkowanie

Wersja na statywie jezdnym nie wymaga żadnego montażu – lampę wyjmuje się z kartonu, składa i przetacza pod stół. To wybór do gabinetów wynajmowanych, sal wielofunkcyjnych i wszędzie tam, gdzie lampa ma czasem stanąć w drugim pomieszczeniu.

Sterylizowalny uchwyt w środku głowicy pozwala chirurgowi ustawiać lampę w trakcie zabiegu bez pomocy instrumentariuszki. Uchwyt zdejmuje się i autoklawuje razem z narzędziami.

Lampa operacyjna LED w codziennej pracy lecznicy

Lampa do chirurgii miękkiej i ortopedii

Ogniskowane pole pozwala skupić światło na dnie jamy brzusznej przy laparotomii u dużego psa, a przy zabiegach na kończynie rozszerzyć je na całe pole.

Lampa zabiegowa do stomatologii i drobnych zabiegów

Wysoki współczynnik Ra przydaje się przy ocenie dziąseł i błon śluzowych; niska emisja ciepła pozwala trzymać lampę blisko głowy pacjenta przez cały zabieg.

Porównanie lamp operacyjnych Dr. Mach LED 150

Wersja	Natężenie (1 m)	Pole świetlne	Statyw	Ściana	Sufit
LED 150	110 000 lx	stałe, 19 cm	612940	612941	612942 (2,6–4 m)
LED 150F	110 000 lx	ogniskowane, 18–25 cm	612943	612944	612945 (do 3 m)
LED 150FP	130 000 lx	ogniskowane, 17–24 cm	612946	612947	612948 (2,6–4 m)

Wspólne dla całej rodziny: współczynnik oddawania barw Ra 96, temperatura barwowa 4300 K, ściemniacz elektryczny 50–100 %, głowica Ø 38 cm, 26 diod LED, pobór mocy 35 W, sterylizowalny uchwyt.

Cena lampy operacyjnej zależy od wersji i sposobu montażu – napisz do nas, podając wysokość sali i rodzaj stropu, a przygotujemy wycenę z montażem.

Dla kogo jest lampa Dr. Mach LED 150FP statyw jezdny

Dla lecznic, które operują codziennie i chcą mieć lampę z prawdziwej sali operacyjnej, a nie lampę zabiegową z gabinetu. Statyw wybierz, gdy lampa ma być mobilna albo gdy nie chcesz ingerować w ściany i strop.

Dane techniczne

Kod produktu	612946
Numer katalogowy producenta	612946
Producent	Dr. Mach
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 06.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/lampa-operacyjna-dr-mach-led-150fp-statyw>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Vetx