

EICKEMEYER

System ogrzewania pacjenta EickWarm Air (nadmuch ciepłego powietrza)

Urządzenie do ogrzewania małych zwierząt ciepłym powietrzem: nastawy 32, 35, 38 i 43 °C oraz powietrze otoczenia, trzy biegi wentylatora, praca ≤55 dB, nagrzewanie w 60 sekund. Wąż grzewczy 2 m, masa 6,5 kg.



Cena na zapytanie

Kod produktu	648000
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Waga	6.5 kg
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/eickwarm-air-ogrzewanie-pacjenta

Opis

EickWarm Air – ogrzewanie pacjenta ciepłym powietrzem

Hipotermia śródoperacyjna jest jednym z najczęstszych powikłań znieczulenia u małych zwierząt – tak opisuje to sam producent i tak wygląda to na stole: pacjent w narkozie traci zdolność do termoregulacji, a ciepło ucieka przez otwartą jamę ciała, wilgotną skórę i zimne powietrze sali. Aktywne ogrzewanie w okresie okołoperacyjnym skraca wybudzanie i zmniejsza ryzyko powikłań.

EickWarm Air to nadmuchowy system ogrzewania: urządzenie tłoczy ciepłe powietrze do maty grzewczej ułożonej pod pacjentem, a mata rozprowadza je równomiernie pod całym ciałem. Pacjent jest ogrzewany aktywnie, a pole operacyjne pozostaje wolne.

Co potrafi to urządzenie grzewcze

- nastawy temperatury: powietrze otoczenia, 32 °C, 35 °C, 38 °C i 43 °C,
- trzy poziomy wentylatora (przepływ powietrza),
- rozgrzewa się w 60 sekund,
- praca cicha – producent podaje ≤55 dB,

- wbudowane czujniki mierzą temperaturę powietrza wychodzącego z węża,
- rozbudowane alarmy dla bezpieczeństwa pacjenta,
- uchwyt do zamocowania np. na stojaku od kroplówki.

Maty grzewcze kupuje się osobno – do tego urządzenia pasują maty MOECK (648110 mała, 648115 średnia). Samo urządzenie bez maty nie ogrzeje pacjenta.

Ogrzewanie nadmuchowe a mata elektryczna

Nadmuch ogrzewa całą powierzchnię ciała stykającą się z matą i nie tworzy punktów przegrzania, bo ciepło niesie powietrze, a nie przewód grzejny. To dlatego systemy nadmuchowe są standardem tam, gdzie pacjent leży w narkozie dłużej niż kilkanaście minut.

Dla kogo jest EickWarm Air

Dla lecznic wykonujących zabiegi w narkozie wziewnej, szczególnie u kotów i psów małych ras, u których wychłodzenie postępuje najszybciej.

Dane techniczne

Kod produktu	648000
Numer katalogowy producenta	648000
Producent	Eickemeyer
Waga	6.5 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	30.0 × 37.0 × 34.0 cm
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 07.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/eickwarm-air-ogrzewanie-pacjenta>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.