

EICKEMEYER

System ogrzewania i chłodzenia pacjenta EickWarm H₂O z dwiema matami

Wodny system termoterapii EickWarm H₂O: płynna regulacja 10–45 °C, cyfrowy wyświetlacz temperatury i poziomu wody, trzy tryby timera, dwie maty (55 × 55 cm i 55 × 100 cm). Masa 1,2 kg.



Cena na zapytanie

Kod produktu	648020
Producent	Eickemeyer
Dostępność	niedostępny
Waga	1.2 kg
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/eickwarm-h2o-ogrzewanie-pacjenta

Opis

EickWarm H₂O – ogrzewanie pacjenta obiegiem wody

Hipotermia śródoperacyjna jest jednym z najczęstszych powikłań znieczulenia u małych zwierząt – tak opisuje to sam producent i tak wygląda to na stole: pacjent w narkozie traci zdolność do termoregulacji, a ciepło ucieka przez otwartą jamę ciała, wilgotną skórę i zimne powietrze sali. Aktywne ogrzewanie w okresie okołoperacyjnym skraca wybudzanie i zmniejsza ryzyko powikłań.

W tym systemie ciepło niesie woda demineralizowana krążąca w szczelnej macie grzejnej pod pacjentem. To terapia przewodząca: mata przylega do ciała i oddaje ciepło bezpośrednio, bez nadmuchu i bez ruchu powietrza nad polem operacyjnym.

Parametry tego systemu ogrzewania

- płynna regulacja temperatury od 10 °C do 45 °C,
- cyfrowy wyświetlacz temperatury i poziomu wody,
- trzy tryby timera,
- zawory zamykające zapobiegają wyciekowi przy zmianie maty,

- w komplecie dwie maty: 55 × 55 cm i 55 × 100 cm,
- wąż i przewód zasilający po ok. 150 cm,
- wymiary 19 × 19 × 17 cm, masa 1,2 kg.

Zakres od 10 °C oznacza, że po napełnieniu wstępnie schłodzoną wodą urządzenie służy też do chłodzenia pacjenta – przy udarze cieplnym albo w hipertermii złośliwej.

System wodny czy nadmuchowy

Wodny jest cichszy, mniejszy i pozwala schładzać; nadmuchowy (EickWarm Air) szybciej podnosi temperaturę dużego pacjenta i nie wymaga wody demineralizowanej. Wybór zależy od tego, czy w lecznicy częściej walczy się z wychłodzeniem czy z przegrzaniem.

Dla kogo jest EickWarm H₂O

Dla lecznic o ograniczonym miejscu na sali i dla tych, które chcą mieć jedno urządzenie do ogrzewania i do kontrolowanego schładzania.

Dane techniczne

Kod produktu	648020
Numer katalogowy producenta	648020
Producent	Eickemeyer
Waga	1.2 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	19.0 × 19.0 × 17.0 cm
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 07.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/eickwarm-h2o-ogrzewanie-pacjenta>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.