

ASTAR

Aparat do magnetoterapii Astar PhysioMG 827

Sterownik magnetoterapii z 2 kanałami, ekranem 7", Trybem Dualnym i Spektrum 0–50 Hz. Jedyny model Astar współpracujący z cewką CS75 o średnicy 75 cm – dla największych psów.

**7 250,00 zł**

brutto (VAT 8%) - netto 6 712,96 zł

Kod produktu	AST-PHYSIOMG-827
Producent	Astar
Dostępność	niedostępny
Waga	7.0 kg
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/aparat-do-magnetoterapii-physiomg-827

Opis

Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów: lekarzy weterynarii, zoofizjoterapeutów i placówek weterynaryjnych. Dobór parametrów zabiegu zawsze należy do osoby prowadzącej terapię.

Aparat do magnetoterapii PhysioMG 827 – najmocniejszy sterownik rodziny Astar

PhysioMG 827 to sterownik pola magnetycznego niskiej częstotliwości, który Astar pokazuje na swojej stronie weterynaryjnej jako model dla gabinetów rehabilitacji zwierząt. Dwa niezależne kanały, ekran dotykowy 7 cali i możliwość podłączenia największej cewki w ofercie – CS75 o średnicy 75 cm – sprawiają, że w tej samej cewce zmieści się zarówno kot, jak i duży pies leżący na leżance.

Producent podaje 264 wbudowane programy zabiegowe podzielone na dziedziny i jednostki chorobowe, encyklopedię z metodyką zabiegu w wizualizacjach 3D oraz statystyki wykonanych zabiegów. Parametry ustawia się z dokładnością do 0,01 Hz, a czas z dokładnością do 1 s.

Tryb Dualny i Spektrum w aparacie do magnetoterapii PhysioMG 827

Tryb Dualny pozwala pracować jednocześnie dwoma aplikatorami: szpulowym o działaniu ogólnoustrojowym i płaskim o działaniu miejscowym. Spektrum to zmienna częstotliwość 0–50 Hz w trakcie jednego zabiegu,

dzięki której nie trzeba wybierać jednej wartości dla całej sesji. W rehabilitacji psa po operacji ortopedycznej można więc objąć całe ciało cewką CS60, a aplikator CPEP przypiąć pasem na operowany staw.

Magnetoterapia, którą zwierzę „czuje”

Astar montuje w aplikatorach szpulowych oświetlacz (wizualny wskaźnik pola) i dodaje pasy magnetyczne, które lekko wibrują podczas emisji. U ludzi to element komfortu, w gabinecie weterynaryjnym to przede wszystkim informacja dla lekarza, że pole rzeczywiście jest emitowane i gdzie leży jego środek.

Co jest w cenie: sam sterownik PhysioMG 827 z kablem, pasami i wyposażeniem podstawowym. Aplikatory (CS35, CS60, CS75, CP, CPEP), leżankę i stolik dobiera się osobno – linki poniżej w towarach powiązanych.

Aplikatory do aparatu magnetoterapii PhysioMG 827

Aplikator	Typ	Indukcja w środku / przy ścianie	Masa	Współpraca
CS35	szpulowy Ø 35 cm	10 / 12 mT	15 kg (Al)	PhysioMG 815, 825, 827
CS60	szpulowy Ø 60 cm	4 / 6 mT	16 kg (Al)	PhysioMG 815, 825, 827
CS75	szpulowy Ø 75 cm	3 / 4,5 mT	18 kg (Al)	tylko PhysioMG 827
CP	płaski na statywie	3 / 12,5 mT	5,5 kg (29 kg ze statywem)	PhysioMG 815, 825, 827
CPEP	płaski na pasach (2 cewki)	25 / 50 mT	2,2 kg	PhysioMG 825, 827

Aplikatory szpulowe CS60 i CS75 jeżdżą po leżance na systemie jezdnym, CS35 stoi na własnym stoliku z dwiema półkami (kończyny), a płaski CP ma statyw na kółkach z regulacją wysokości 40–110 cm – wygodny przy koniu w boksie lub przy stole zabiegowym.

Porównanie aparatów do magnetoterapii Astar PhysioMG

Model	Ekran	Kanały	Tryb Dualny	Spektrum 0–50 Hz	Aplikatory	Programy wbudowane	Cena brutto
PhysioMG 815	5" dotykowy	1	nie	tak	CS35, CS60, CP	124	5 300 zł
PhysioMG 825	5" dotykowy	2	tak	tak	CS35, CS60, CP, CPEP	213	6 360 zł
PhysioMG 827	7" dotykowy	2	tak	tak	CS35, CS60, CS75, CP, CPEP	264	7 250 zł

Magnetoterapia niskiej częstotliwości w praktyce weterynaryjnej

Producent wymienia działanie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, wspomagające gojenie ran i regenerację tkanek, w tym kostnej. W pracy z psami i końmi magnetoterapię stosuje się zwykle jako uzupełnienie po zabiegach ortopedycznych, w zmianach zwyrodnieniowych i przy przewlekłych stanach zapalnych. Zabieg jest bezbolesny i nie wymaga golenia sierści, co przy nerwowych pacjentach ma znaczenie.

W zestawie

- sterownik PhysioMG 827, kabel zasilający
- pas magnetyczny (wskaźnik sensoryczny), magnes stały
- pasy mocujące 60 × 5 cm i 120 × 5 cm, rzep pętelka samoprzylepny 100 × 2 cm
- okulary ochronne dla pacjenta, bezpieczniki zapasowe, rysik i ścierka do ekranu
- instrukcja, paszport techniczny, karta gwarancyjna, protokół pokontrolny

Dane techniczne

Kod produktu	AST-PHYSIOMG-827
Numer katalogowy producenta	A-UG-AST-PMG827
Producent	Astar
Waga	7.0 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	34.0 × 28.0 × 11.0 cm
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 05.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/aparat-do-magnetoterapii-physiomg-827>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.