

DOCSINNOVENT

## Maska krtaniowa v-gel ADVANCED dla psa D3

Jednorazowa maska krtaniowa (urządzenie nadgłośniowe) v-gel ADVANCED dla psa, rozmiar D3, dla pacjentów o masie 2–4 kg (dolichocefaliczne) / 4–7 kg (mezocefaliczne) / 6–10 kg (brachycefaliczne). Bez nadmuchiwanego mankietu.



### Cena na zapytanie

|                 |                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kod produktu    | D20003                                                                                                                          |
| Producent       | Docsinnovent                                                                                                                    |
| Dostępność      | niedostępny                                                                                                                     |
| Adres w sklepie | <a href="https://vetx.elmedico.pl/p/maska-krtaniowa-v-gel-pies-d3">https://vetx.elmedico.pl/p/maska-krtaniowa-v-gel-pies-d3</a> |

### Opis

#### Maska krtaniowa v-gel ADVANCED dla psa – rozmiar D3

Wersja dla psa ma to, czego nie mają maski krtaniowe dla kota i królika: wbudowany kanał żołądkowy. Przez niego można odessać treść żołądkową albo żółć, przepłukać żołądek i podać leki — a przede wszystkim w porę zobaczyć, że doszło do zarzucania.

#### Jak działa maska krtaniowa v-gel

To urządzenie nadgłośniowe: nie wchodzi do tchawicy, tylko układa się w gardle, obejmując krtań i nagłośnień. Uszczelnienie bierze się z anatomicznego kształtu i miękkiego materiału, a nie z nadmuchiwanego mankietu — nie ma więc czym uszkodzić krtani ani tchawicy. Producent podaje czas założenia poniżej dziesięciu sekund.

#### Co to zmienia w praktyce

- brak urazu krtani i tchawicy, spokojniejsze wybudzanie bez kaszlu i krztuszenia,
- szeroki kanał oddechowy, czyli mały opór przepływu,
- dobra szczelność, więc mniej gazu anestetycznego ucieka do sali,

- końcówka wchodzi do początkowego odcinka przełyku i pomaga opanować zarzucanie treści żołądkowej,
- nadaje się i do oddechu własnego, i do wentylacji mechanicznej.

## Kanał żołądkowy – co daje w czasie znieczulenia

Dołączony dren żołądkowy wprowadza się kanałem urządzenia. Można nim odsysać treść żołądkową i żółć, płukać żołądek i podawać leki. Ogranicza to ryzyko zwężeń przełyku, oparzeń kwaśną treścią i zachłyśnięcia – powikłań, które przy klasycznej intubacji zwykle zauważa się dopiero po fakcie.

Rozmiar D3 producent przypisuje pacjentom o masie 2–4 kg (dolichocefaliczne) / 4–7 kg (mezocefaliczne) / 6–10 kg (brachycefaliczne). Tabela doboru jest wskazówką – o wyborze decyduje wielkość i kształt gardła, a nie sama waga.

## Dane maski krtaniowej D3

- gatunek: pies,
- rozmiar D3,
- idealna masa ciała pacjenta: 2–4 kg (dolichocefaliczne) / 4–7 kg (mezocefaliczne) / 6–10 kg (brachycefaliczne),
- urządzenie nadgłośniowe, bez nadmuchiwanego mankietu,
- złącze o małej przestrzeni martwej,
- jednorazowego użytku.

## Dane techniczne

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Kod produktu                | D20003       |
| Numer katalogowy producenta | D20003       |
| Producent                   | Docsinnovent |
| Jednostka                   | szt.         |
| Numer seryjny               | nie dotyczy  |

Karta produktu wygenerowana 07.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/maska-krtaniowa-v-gel-pies-d3>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.