

DOCSINNOVENT

Maska krtaniowa v-gel ADVANCED dla psa D6

Jednorazowa maska krtaniowa (urządzenie nadgłośniowe) v-gel ADVANCED dla psa, rozmiar D6, dla pacjentów o masie 9–15 kg (dolichocefaliczne) / 14–20 kg (mezocefaliczne) / 19–26 kg (brachycefaliczne). Bez nadmuchiwanego mankietu.



Cena na zapytanie

Kod produktu	D20006
Producent	Docsinnovent
Dostępność	niedostępny
Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/maska-krtaniowa-v-gel-pies-d6

Opis

Maska krtaniowa v-gel ADVANCED dla psa – rozmiar D6

Wersja dla psa ma to, czego nie mają maski krtaniowe dla kota i królika: wbudowany kanał żołądkowy. Przez niego można odessać treść żołądkową albo żółć, przepłukać żołądek i podać leki — a przede wszystkim w porę zobaczyć, że doszło do zarzucania.

Jak działa maska krtaniowa v-gel

To urządzenie nadgłośniowe: nie wchodzi do tchawicy, tylko układa się w gardle, obejmując krtań i nagłośnień. Uszczelnienie bierze się z anatomicznego kształtu i miękkiego materiału, a nie z nadmuchiwanego mankietu — nie ma więc czym uszkodzić krtani ani tchawicy. Producent podaje czas założenia poniżej dziesięciu sekund.

Co to zmienia w praktyce

- brak urazu krtani i tchawicy, spokojniejsze wybudzanie bez kaszlu i krztuszenia,
- szeroki kanał oddechowy, czyli mały opór przepływu,
- dobra szczelność, więc mniej gazu anestetycznego ucieka do sali,

- końcówka wchodzi do początkowego odcinka przełyku i pomaga opanować zarzucanie treści żołądkowej,
- nadaje się i do oddechu własnego, i do wentylacji mechanicznej.

Kanał żołądkowy – co daje w czasie znieczulenia

Dołączony dren żołądkowy wprowadza się kanałem urządzenia. Można nim odsysać treść żołądkową i żółć, płukać żołądek i podawać leki. Ogranicza to ryzyko zwężeń przełyku, oparzeń kwaśną treścią i zachłyśnięcia – powikłań, które przy klasycznej intubacji zwykle zauważa się dopiero po fakcie.

Rozmiar D6 producent przypisuje pacjentom o masie 9–15 kg (dolichocefaliczne) / 14–20 kg (mezocefaliczne) / 19–26 kg (brachycefaliczne). Tabela doboru jest wskazówką – o wyborze decyduje wielkość i kształt gardła, a nie sama waga.

Dane maski krtaniowej D6

- gatunek: pies,
- rozmiar D6,
- idealna masa ciała pacjenta: 9–15 kg (dolichocefaliczne) / 14–20 kg (mezocefaliczne) / 19–26 kg (brachycefaliczne),
- urządzenie nadgłośniowe, bez nadmuchiwanego mankietu,
- złącze o małej przestrzeni martwej,
- jednorazowego użytku.

Dane techniczne

Kod produktu	D20006
Numer katalogowy producenta	D20006
Producent	Docsinnovent
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 07.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/maska-krtaniowa-v-gel-pies-d6>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.