

DOCSINNOVENT

Maska krtaniowa v-gel ADVANCED dla królika R1

Jednorazowa maska krtaniowa (urządzenie nadgłośniowe) v-gel ADVANCED dla królika, rozmiar R1, dla pacjentów o masie 0,6–1,5 kg. Bez nadmuchiwanego mankietu.

**157,44 zł**

brutto (VAT 8%) - netto 145,78 zł

Kod produktu	J1350AN
--------------	---------

Producent	Docsinnovent
-----------	--------------

Dostępność	niedostępny
------------	-------------

Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/maska-krtaniowa-v-gel-krolik-r1
-----------------	---

Opis

Maska krtaniowa v-gel ADVANCED dla królika – rozmiar R1

Intubacja królika jest trudna technicznie i stresująca dla pacjenta, a maska twarzowa nie daje szczelności. v-gel ADVANCED to trzecia droga: urządzenie nadgłośniowe dopasowane kształtem do anatomii gardła królika, zakładane w kilka sekund.

Jak działa maska krtaniowa v-gel

To urządzenie nadgłośniowe: nie wchodzi do tchawicy, tylko układa się w gardle, obejmując krtań i nagłośnień. Uszczelnienie bierze się z anatomicznego kształtu i miękkiego materiału, a nie z nadmuchiwanego mankietu – nie ma więc czym uszkodzić krtani ani tchawicy. Producent podaje czas założenia poniżej dziesięciu sekund.

Co to zmienia w praktyce

- brak urazu krtani i tchawicy, spokojniejsze wybudzanie bez kaszlu i krztuszenia,
- szeroki kanał oddechowy, czyli mały opór przepływu,
- dobra szczelność, więc mniej gazu anestetycznego ucieka do sali,
- końcówka wchodzi do początkowego odcinka przełyku i pomaga opanować zarzucanie treści żołądkowej,

- nadaje się i do oddechu własnego, i do wentylacji mechanicznej.

Dlaczego u królika to działa lepiej niż rurka

Miska gardłowa obejmuje całą krtani, a nagłośnia zostaje w środku — nie podwija się i nie dochodzi do zastoju w języku, który u królików objawia się charakterystycznym zsinieniem. Pierścienie do przywiązania są przerwane od góry i od dołu, żeby nie zaczepiały o siekacze przy zakładaniu.

Rozmiar R1 producent przypisuje pacjentom o masie 0,6–1,5 kg. Tabela doboru jest wskazówką — o wyborze decyduje wielkość i kształt gardła, a nie sama waga.

Dane maski krtaniowej R1

- gatunek: królik,
- rozmiar R1,
- idealna masa ciała pacjenta: 0,6–1,5 kg,
- urządzenie nadgłośniowe, bez nadmuchiwanego mankietu,
- złącze o małej przestrzeni martwej,
- jednorazowego użytku.

Dane techniczne

Kod produktu	J1350AN
Numer katalogowy producenta	D30001
Producent	Docsinnovent
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 07.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/maska-krtaniowa-v-gel-krolik-r1>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.