

DOCSINNOVENT

## Maska krtaniowa v-gel ADVANCED dla królika R2

Jednorazowa maska krtaniowa (urządzenie nadgłośniowe) v-gel ADVANCED dla królika, rozmiar R2, dla pacjentów o masie 1–2 kg. Bez nadmuchiwanego mankietu.

**154,98 zł**

brutto (VAT 8%) - netto 143,50 zł

|              |         |
|--------------|---------|
| Kod produktu | J1350BN |
|--------------|---------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Producent | Docsinnovent |
|-----------|--------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Dostępność | niedostępny |
|------------|-------------|

|                 |                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adres w sklepie | <a href="https://vetx.elmedico.pl/p/maska-krtaniowa-v-gel-krolik-r2">https://vetx.elmedico.pl/p/maska-krtaniowa-v-gel-krolik-r2</a> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Opis

#### Maska krtaniowa v-gel ADVANCED dla królika – rozmiar R2

Intubacja królika jest trudna technicznie i stresująca dla pacjenta, a maska twarzowa nie daje szczelności. v-gel ADVANCED to trzecia droga: urządzenie nadgłośniowe dopasowane kształtem do anatomii gardła królika, zakładane w kilka sekund.

#### Jak działa maska krtaniowa v-gel

To urządzenie nadgłośniowe: nie wchodzi do tchawicy, tylko układa się w gardle, obejmując krtań i nagłośnień. Uszczelnienie bierze się z anatomicznego kształtu i miękkiego materiału, a nie z nadmuchiwanego mankietu – nie ma więc czym uszkodzić krtani ani tchawicy. Producent podaje czas założenia poniżej dziesięciu sekund.

#### Co to zmienia w praktyce

- brak urazu krtani i tchawicy, spokojniejsze wybudzanie bez kaszlu i krztuszenia,
- szeroki kanał oddechowy, czyli mały opór przepływu,
- dobra szczelność, więc mniej gazu anestetycznego ucieka do sali,
- końcówka wchodzi do początkowego odcinka przełyku i pomaga opanować zarzucanie treści żołądkowej,

- nadaje się i do oddechu własnego, i do wentylacji mechanicznej.

## Dlaczego u królika to działa lepiej niż rurka

Miska gardłowa obejmuje całą krtani, a nagłośnia zostaje w środku — nie podwija się i nie dochodzi do zastoju w języku, który u królików objawia się charakterystycznym zsinieniem. Pierścienie do przywiązania są przerwane od góry i od dołu, żeby nie zaczepiały o siekacze przy zakładaniu.

Rozmiar R2 producent przypisuje pacjentom o masie 1–2 kg. Tabela doboru jest wskazówką — o wyborze decyduje wielkość i kształt gardła, a nie sama waga.

## Dane maski krtaniowej R2

- gatunek: królik,
- rozmiar R2,
- idealna masa ciała pacjenta: 1–2 kg,
- urządzenie nadgłośniowe, bez nadmuchiwanego mankietu,
- złącze o małej przestrzeni martwej,
- jednorazowego użytku.

## Dane techniczne

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Kod produktu                | J1350BN      |
| Numer katalogowy producenta | D30002       |
| Producent                   | Docsinnovent |
| Jednostka                   | szt.         |
| Numer seryjny               | nie dotyczy  |

Karta produktu wygenerowana 07.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/maska-krtaniowa-v-gel-krolik-r2>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.