

DOCSINNOVENT

Maska krtaniowa v-gel ADVANCED dla kota C4

Jednorazowa maska krtaniowa (urządzenie nadgłośniowe) v-gel ADVANCED dla kota, rozmiar C4, dla pacjentów o masie 4,5–6 kg. Bez nadmuchiwanego mankietu.

**211,56 zł**

brutto (VAT 8%) - netto 195,89 zł

Kod produktu	J1351EN
--------------	---------

Producent	Docsinnovent
-----------	--------------

Dostępność	niedostępny
------------	-------------

Adres w sklepie	https://vetx.elmedico.pl/p/maska-krtaniowa-v-gel-kot-c4
-----------------	---

Opis

Maska krtaniowa v-gel ADVANCED dla kota – rozmiar C4

Alternatywa dla rurki dotchawiczej u kota. Kot to gatunek, u którego intubacja najczęściej kończy się podrażnieniem krtani, a bywa, że i zapaleniem tchawicy przy powtarzanych znieczuleniach – v-gel omija ten problem, bo w ogóle nie wchodzi między fałdy głosowe.

Jak działa maska krtaniowa v-gel

To urządzenie nadgłośniowe: nie wchodzi do tchawicy, tylko układa się w gardle, obejmując krtani i nagłośnie. Uszczelnienie bierze się z anatomicznego kształtu i miękkiego materiału, a nie z nadmuchiwanego mankietu – nie ma więc czym uszkodzić krtani ani tchawicy. Producent podaje czas założenia poniżej dziesięciu sekund.

Co to zmienia w praktyce

- brak urazu krtani i tchawicy, spokojniejsze wybudzanie bez kaszlu i krztuszenia,
- szeroki kanał oddechowy, czyli mały opór przepływu,
- dobra szczelność, więc mniej gazu anestetycznego ucieka do sali,
- końcówka wchodzi do początkowego odcinka przełyku i pomaga opanować zarzucanie treści żołądkowej,

- nadaje się i do oddechu własnego, i do wentylacji mechanicznej.

Maska krtaniowa a zabiegi stomatologiczne u kota

Przy sanacji jamy ustnej v-gel daje dwie rzeczy naraz: izoluje wejście do krtani od wody z chłodzenia skalera i pozwala przesuwając urządzenie na boki, żeby dostać się do zębów po drugiej stronie. Producent podkreśla też, że nie ma potrzeby wersji krótkich i długich – rozmiar dobiera się wyłącznie po masie ciała, także u ras brachycefalicznych.

Rozmiar C4 producent przypisuje pacjentom o masie 4,5–6 kg. Tabela doboru jest wskazówką – o wyborze decyduje wielkość i kształt gardła, a nie sama waga.

Dane maski krtaniowej C4

- gatunek: kot,
- rozmiar C4,
- idealna masa ciała pacjenta: 4,5–6 kg,
- urządzenie nadgłośniowe, bez nadmuchiwanego mankietu,
- złącze o małej przestrzeni martwej,
- jednorazowego użytku.

Dane techniczne

Kod produktu	J1351EN
Numer katalogowy producenta	D40004
Producent	Docsinnovent
Jednostka	szt.
Numer seryjny	nie dotyczy

Karta produktu wygenerowana 07.09.2026 ze strony <https://vetx.elmedico.pl/p/maska-krtaniowa-v-gel-kot-c4>. Ceny i dostępność aktualne w chwili wygenerowania; dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.